



Použití hmot MiYO pink

Průsvitné základní barvy pro velké gingivální plochy.	TRANS RASPBERRY	TRANS CARNATION
Průsvitná základní barva pro oranžově zbarvené gingivální oblasti.	TRANS COPPER	
Modravý průsvitný barevný materiál např. pro žilky.	TRANS MIDNIGHT	
Červená průsvitná barevná hmota - čistá nebo k míchání pro stínování.	TRANS GARNET	
Neprůhledné barvicí hmoty pro individualizaci v průsvitných gingiválních hmotách a na nich.	FLAMINGO	CRIMSON
	PLUM	MERLOT
	SORBET	SALMON
	SABLE	THISTLE
	HIBISCUS	
Čistá černá barva pro individualizaci růžových materiálů MiYO.	NIGHT	
Barevný prášek pro vkládání do průsvitných materiálů.	VENULE	
Tmavě růžově zbarvená texturovací pasta.	STRUCTURE ORCHID	
Hnědočervená texturovací pasta.	STRUCTURE ROUGE	
Bělavě růžově zbarvená strukturovací pasta, např. pro designování lemů rtů.	STRUCTURE FROST	

MiYO

Použití hmot MiYO

Charakteristika základních odstínů Vita Classic.	TRANS SHADE A	TRANS SHADE B	TRANS SHADE C	TRANS SHADE D
K individualizaci krčkové oblasti.	TRANS STRAW	TRANS LOTUS	TRANS CLEMENTINE	
K individualizaci mezizubního prostoru.	TRANS SAGE			
Ke snížení hodnoty jasu.	TRANS STORM	TRANS SMOKE	TRANS SLATE	TRANS COBALT
Ke zvýšení hodnoty jasu.	TRANS LUMIN	TRANS LUMIN PLUS		
Modifikuje barevné materiály do teplých, jemných základních odstínů.	TRANS SUNFLOWER			
Modifikuje barevné materiály na červenofialové/fialové.	TRANS GARNET			
K imitaci přirozených mamelonů.	MAMELON WHEAT	MAMELON CORAL	MAMELON PUMPKIN	
Pro imitaci halo efektu v oblasti řezáků.	HALO SPRING	HALO AUTUMN		
Pro křídově zbarvené špičky skloviny, defekty skloviny, vápenaté skvrny.	SNOW			
Pro světlé optické efekty, např. praskliny skloviny, depigmentizace.	LINEN			
Pro imitaci prasklin nebo barevných skvrn.	FISSURE			
Pro přizpůsobení barevných materiálů MiYO.	MOSS			
Pro snížení hodnoty jasu s vyšší intenzitou.	NIGHT			
Strukturovací pasty k dosažení tvaru a charakterizaci individuální textury povrchu.	STRUCTURE ENAMEL	STRUCTURE WINDOW	STRUCTURE GHOST	STRUCTURE ICE
			STRUCTURE BLUSH	STRUCTURE
Vysokotavitelné strukturovací pasty. Pro výplně s velkým objemem a větší flexibilitou při vypalování.	HT STRUCTURE ENAMEL	HT STRUCTURE WINDOW		



Obchodní zastoupení v ČR:

Dental Trade a.s.
Donatellova 2003/6
100 00 Praha, Czech Republic
Phone: +420 724 393 271
info@dental-trade.cz
www.dental-trade.cz

Prodej a technická podpora v Evropě:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany
Telefon 0800-857 32 30
info@jensendental.de
www.miyoworld.eu | www.jensendental.de

Výrobce:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com
www.chemichl.com




CS



4018030124

... více MiYO

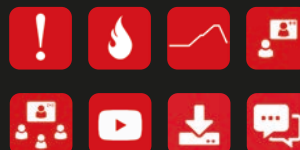

QUICK START GUIDE

Pro dokonalý start.




www.miyoworld.eu



Návod k použití a příprava

Návod k použití

- Nevylévejte přebytečnou tekutinu z nádoby, vždy ji vmíchejte zpět do pasty.
- Před každým použitím důkladně promíchejte nekovovou špachtlí.
- Pasty nesmí přijít do styku s vodou.
- Vždy používejte čistý a suchý štětec.

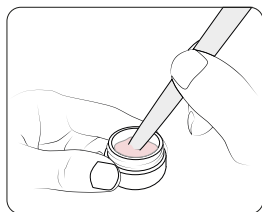

**Před každým použitím
důkladně promíchejte
nekovovou špachtlí**

Příprava

- Příprava konstrukce : v souladu s pokyny výrobce (viz poznámky v pracovním sešitě MiYO str. 19).
- Před aplikací materiálu musí být povrch čistý a zbavený povrchových nečistot.

Aplikace

- Na připravený povrch naneste materiál v souladu s jeho účelem a požadovaným účinkem.

Skladování a likvidace

- Skladujte v suchu při pokojové teplotě
- Menší množství může být likvidováno v domovním odpadu. Zbývající zásoby, prošlý materiál a náhrady vyjmuty z dutiny ústní musí být likvidovány podle místních zákonů, nařízení a vyhlášek. Odpady bez nebezpečných vlastností v režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.



Vypalovací hodnoty

Parametry vypalování*	COLOR STRUCTURE GLAZE PASTE			
	ZrO ₂	InSync ZR	Lithium-Disilikat	Press to Zirkon
startovací teplota [°C]	400 - 450	400 - 450	400 - 450	400 - 450
čas sušení [min]	3	3	3	3
čas uzavírání [min]	4	4	4	4
růst teploty [°C/min]	45	45	45	45
čas držení 1 při konečné teplotě [s]	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45
start vakua [°C]	580	580	580	580
konečná teplota [°C]	720	720	710	720
konec vakua [°C]	720	720	710	720
čas držení 2 při konečné teplotě [s]**	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
čas otevírání [min]	1	1	1	1

Parametry vypalování*	HT STRUCTURE	
	ZrO ₂	InSync Zr
startovací teplota [°C]	400 - 450	400 - 450
čas sušení [min]	3	3
čas uzavírání [min]	4	4
růst teploty [°C/min]	45	45
čas držení 1 při konečné teplotě [s]	30 - 45	30 - 45
start vakua [°C]	600	600
konečná teplota [°C]	775	775
konec vakua [°C]	775	775
čas držení 2 při konečné teplotě [s]**	60	60
čas otevírání [min]	1	1

* Následující parametry jsou standardní hodnoty a mohou se lišit v závislosti na typu pece a velikosti (objemu) náhrady.

** V závislosti na požadovaném stupni lesku čas držení konečné teploty 30 - 60 sekund.



Školení a podpora



Registrace do zákaznického portálu

Na zákaznickém portálu vám poskytujeme exkluzivní školení a informační materiály. Pomocí školicích videí se naučíte bezpečně používat MiYO a MiYO pink. Pokyny k vypalování a pokyny k programování pece vám pomohou naprogramovat vaši pec.

Registrace:

www.miyoworld.eu/login/registrierung

K registraci budete potřebovat číslo soupravy MiYO, které najdete na balení kitu MiYO a pod tekutinou.



Pokyny pro zpracování

Všechny dokumenty pro MiYO, MiYO pink a glazovací pasty jsou k dispozici ke stažení v různých jazycích na našich webových stránkách nebo na přiloženém USB flash disku.

www.miyoworld.eu/en/downloads



Další informace ve vašem jazyce najdete na USB flash disku. 



Podpora

Máte nějaké dotazy k systému MiYO? Obratě se na svého prodejce MiYO.

Můžete nás také kontaktovat pro technickou podporu: support@jensendental.de.



Školení a kurzy

Ohledně školení a kurzů MiYO se obraťte na svého místního prodejce MiYO.



www.miyoworld.eu/en/dealer



Poznámky k vypalovacím grafům

Nastavení různých parametrů vypalování podle velikosti restaurování, podrobnosti viz pracovní sešit MiYO str. 14.

Upozornění: Zpožděný start vakua!

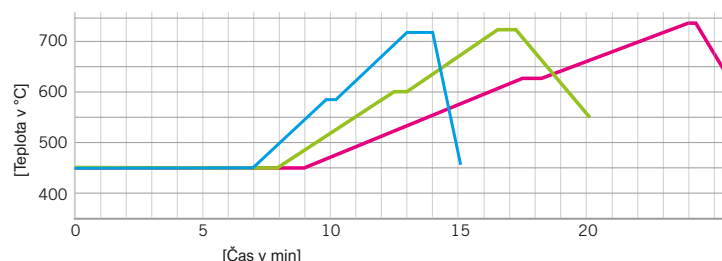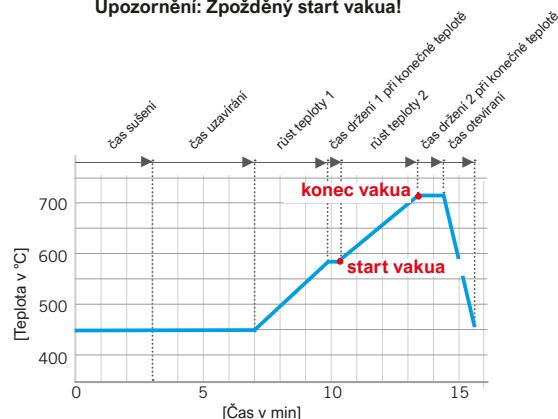

solo korunky/
můstky do 4 členů
5 - 8 členů
9 - 14 členů